


biim

Guia de Iniciação Rápida

Parabéns pela aquisição do sistema Biim
Ultrasound. A sua caixa deverá incluir a Sonda
Biim, a bateria e carregador Biim.
Este Guia de Iniciação Rápida ajudá-lo-á a iniciar
a sua Experiência Biim. Por favor consulte o Guia
do Utilizador para obter as instruções completas
do Sistema Biim Ultrasound.

1. Insira uma bateria Biim carregada na Sonda Biim.

- Poderá ter de carregar a bateria antes da utilização da sonda. Consulte o Guia do Utilizador do Sistema Biim para obter mais detalhes. Insira a bateria e pressione para encaixá-la.

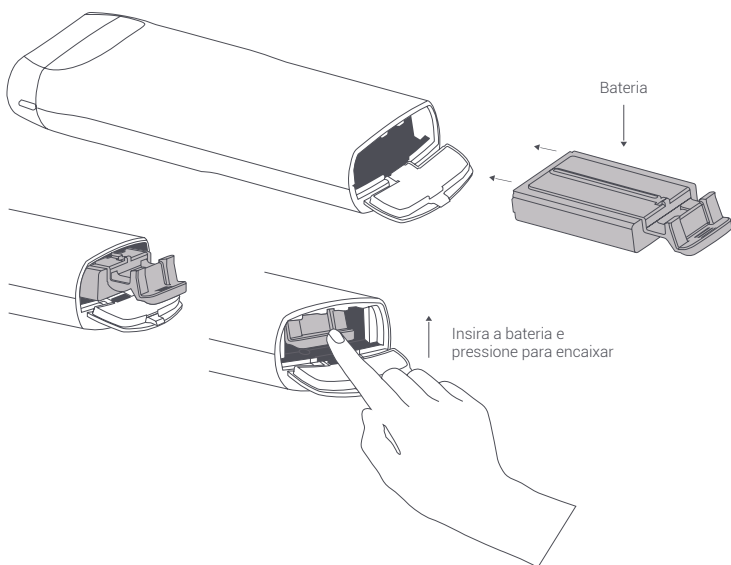


Por favor consulte o Guia do Utilizador Biim para obter as instruções, as advertências e as indicações de utilização completas para a Sonda Biim e para a Aplicação Biim Ultrasound. Os utilizadores deverão ler o Guia do Utilizador Biim para obter informações importantes relativas à segurança e garantia. As violações das instruções do Guia do Utilizador podem resultar na anulação da garantia. Para obter mais informações, aceda a www.biimultrasound.com ou prima o botão "Ajuda" na Aplicação Biim Ultrasound para aceder ao Guia do Utilizador do Sistema Biim.

2. Transfira a Aplicação Biim Ultrasound a partir da App Store ou Google Play no seu dispositivo inteligente.

- A Aplicação Biim Ultrasound é compatível com determinados tablets e telemóveis com sistema operativo iOS e Android.
- Consulte a página da App Store ou Google Play para obter instruções sobre como deve transferir uma aplicação.

3. Ligue a Sonda Biim.

- Prima e mantenha premido o botão de Alimentação durante dois segundos.

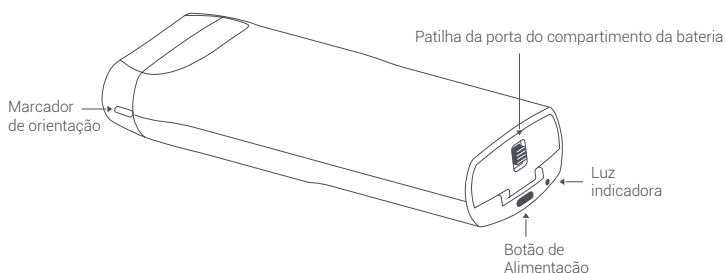

4. Ligue a sua Sonda Biim ao seu dispositivo inteligente.

- a) Abra as configurações do seu dispositivo e certifique-se de que o Wi-Fi do seu dispositivo está ativado e selecione a Sonda Biim a partir das opções de Wi-Fi. A palavra-passe predefinida é "biimeasy".


Quando liga o seu dispositivo pela primeira vez, a sua Sonda Biim será apresentada como "Biim - Número de série da sonda". O Número de série da sua sonda encontra-se na caixa do Sistema Biim e no interior da porta da bateria.

Procure o símbolo: **SN**

- B) Saia das configurações no seu dispositivo antes de abrir a Aplicação Biim.
- c) Abra a Aplicação Biim e siga as instruções do Assistente de Arranque do Sistema Biim.


5. Conheça o seu novo Sistema Biim Ultrasound.

Quando abre pela primeira vez a sua Aplicação Biim, aparecerá o ecrã Início conforme apresentado em baixo.

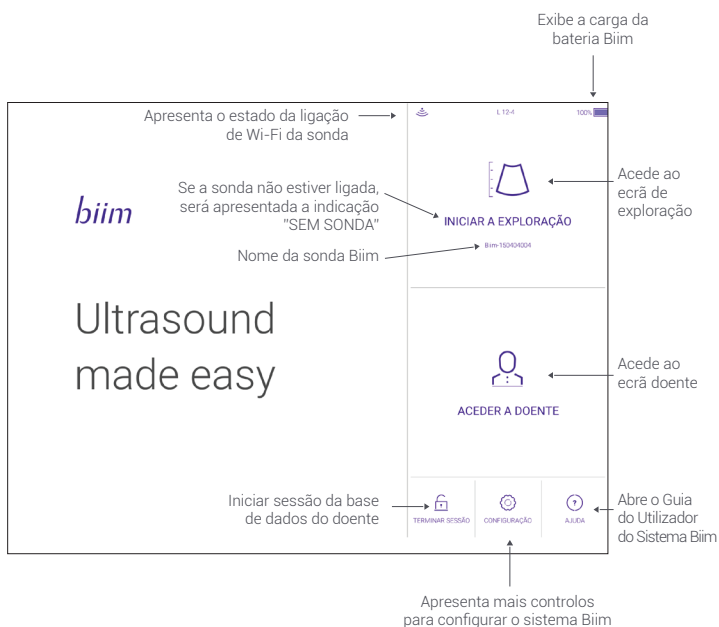


Por favor consulte o Guia do Utilizador Biim para obter as instruções, as advertências e as indicações de utilização completas para a Sonda Biim e para a Aplicação Biim Ultrasound. Os utilizadores deverão ler o Guia do Utilizador Biim para obter informações importantes relativas à segurança e garantia. As violações das instruções do Guia do Utilizador podem resultar na anulação da garantia. Para obter mais informações, aceda a www.biimultrasound.com ou prima o botão "Ajuda" na Aplicação Biim Ultrasound para aceder ao Guia do Utilizador do Sistema Biim.

6. Explore o Ecrã de Exploração do Sistema Biim.

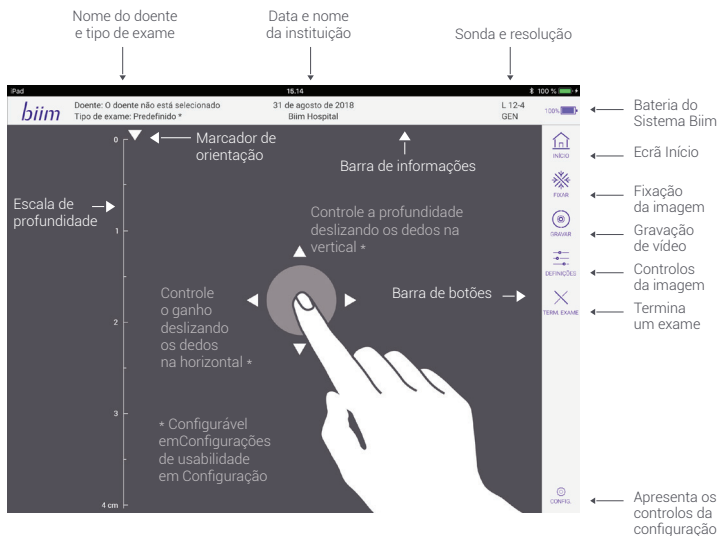

7. Conheça a sua Sonda Biim

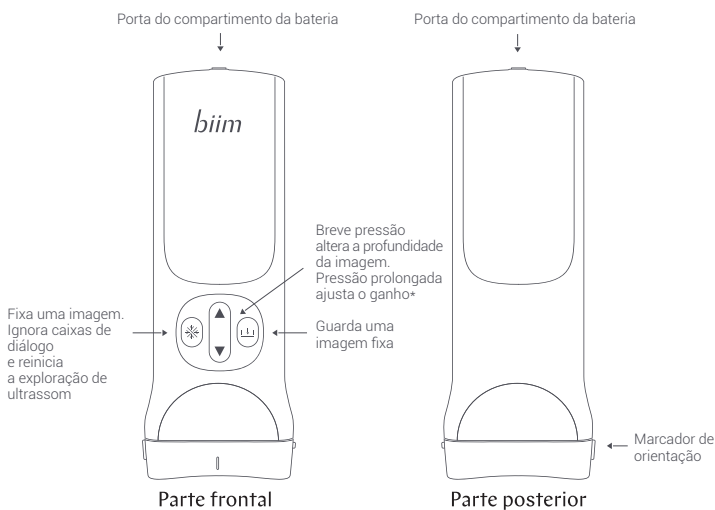

* Configurável em Configurações de usabilidade em Configuração

Ultrasound made easy

biimultrasound.com

support@biimultrasound.com



Biim Ultrasound AS
Frydenlundsgate 9
8516 Narvik
Noruega

