


biim

Guide de démarrage rapide

Nous vous remercions d'avoir acheté le système Biim Ultrasound. Votre boîte doit contenir la sonde Biim, la batterie Biim et son chargeur. Ce Guide de démarrage rapide facilite l'apprentissage du système Biim. Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur Biim pour connaître toutes les instructions sur le système Biim Ultrasound.

1. Insérez la batterie Biim chargée dans la sonde Biim.

- Il peut être nécessaire de charger la batterie avant d'utiliser la sonde. Consultez le Manuel de l'utilisateur Biim pour en savoir plus. Insérez la batterie et appuyez pour la bloquer en place.

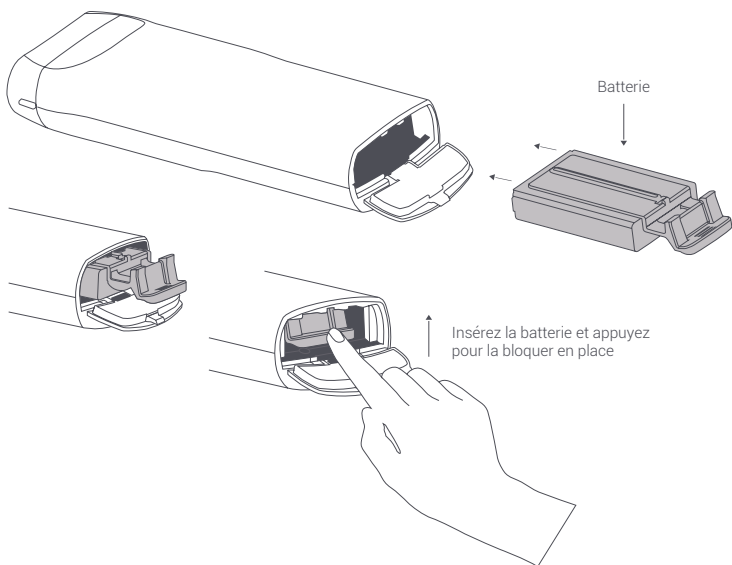


Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur Biim pour connaître toutes les instructions, mises en garde et indications d'utilisation relatives à la sonde Biim et à l'application Biim Ultrasound. Les utilisateurs doivent lire le Manuel de l'utilisateur Biim pour connaître les informations importantes concernant la sécurité et la garantie. Le non-respect des instructions du Manuel de l'utilisateur peut entraîner l'annulation de la garantie. Pour en savoir plus, consultez le site www.biimultrasound.com ou appuyez sur le bouton « Aide » dans l'application Biim Ultrasound pour accéder au Manuel de l'utilisateur Biim.

2. Téléchargez l'application Biim Ultrasound sur votre dispositif d'affichage depuis le site App Store ou Google Play.

- L'application Biim Ultrasound est compatible avec certaines tablettes et certains téléphones équipés des systèmes iOS ou Android.
- Veuillez consulter les sites App Store ou Google Play pour savoir comment télécharger une application.

3. Allumez la sonde Biim.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant deux secondes.

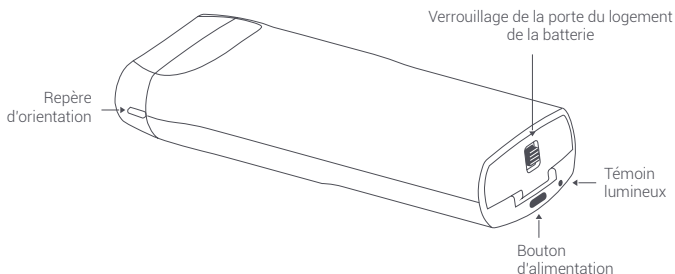

4. Connectez votre sonde Biim à votre dispositif d'affichage.

- a) Accédez aux paramètres de votre dispositif d'affichage et vérifiez que le Wi-Fi est activé sur votre dispositif, puis sélectionnez la sonde Biim dans les options Wi-Fi.

Le mot de passe par défaut est " biimeasy ".


Lors de la première connexion à votre dispositif d'affichage, votre sonde Biim apparaîtra comme " Biim - Numéro de série de la sonde ". Le numéro de série de votre sonde est indiqué sur la boîte Biim et sur la face intérieure de la porte du compartiment de la batterie.

Recherchez le symbole: SN

- b) Quittez l'écran des paramètres de votre dispositif d'affichage avant d'ouvrir l'application Biim.
- c) Ouvrez l'application Biim et suivez les instructions de l'assistant de démarrage Biim.


5. Découvrez votre nouveau système Biim Ultrasound.

À la première ouverture de l'application Biim, l'écran d'accueil s'affiche tel qu'illustré ci-dessous.

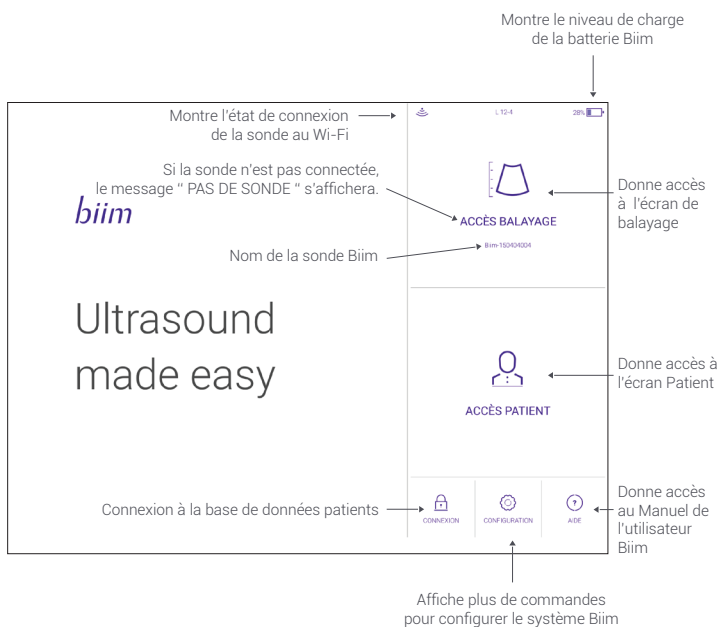


Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur Biim pour connaître toutes les instructions, mises en garde et indications d'utilisation relatives à la sonde Biim et à l'application Biim Ultrasound. Les utilisateurs doivent lire le Manuel de l'utilisateur Biim pour connaître les informations importantes concernant la sécurité et la garantie. Le non-respect des instructions du Manuel de l'utilisateur peut entraîner l'annulation de la garantie. Pour en savoir plus, consultez le site www.biimultrasound.com ou appuyez sur le bouton « Aide » dans l'application Biim Ultrasound pour accéder au Manuel de l'utilisateur Biim.

6. Découvrez l'écran de balayage Biim.

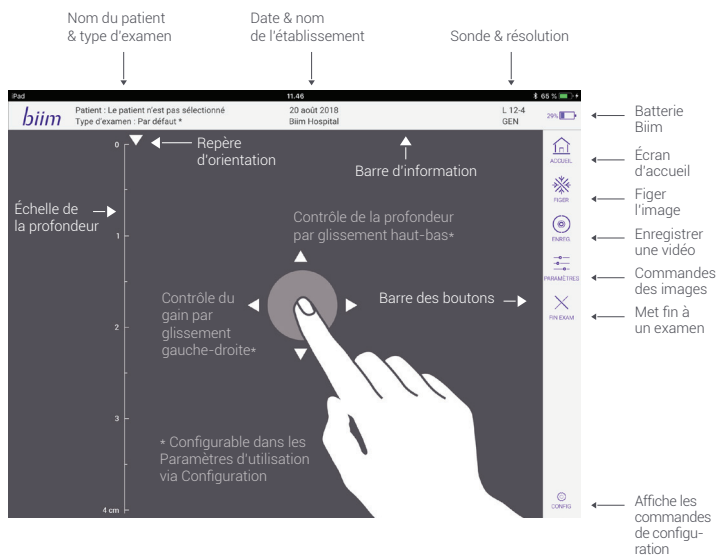

7. Familiarisez-vous avec votre sonde Biim

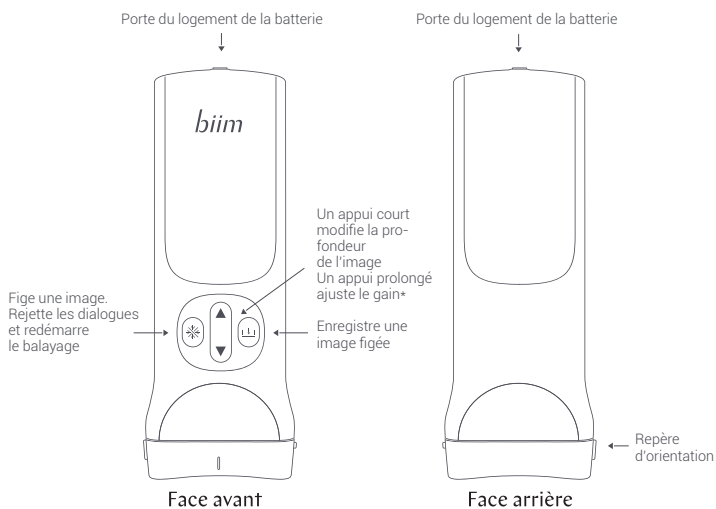

* Configurable dans les Paramètres d'utilisation via Configuration

Ultrasound made easy

biimultrasound.com

support@biimultrasound.com



Biim Ultrasound AS
Frydenlundsgate 9
8516 Narvik
Norvège



0086