

*biim*


Lyn-  
vejledning

Tillykke med købet af dit Biim Ultrasound-system. Æsken skal indeholde Biim-proben, Biim-batteri og oplader. Denne lynvejledning hjælper dig godt på vej i brugen af Biim-udstyret. Der henvises til Biim-brugervejledningen for at få en fuldstændig vejledning til Biim Ultrasound-systemet.

## 1. Indsæt et opladet Biim-batteri i Biim-proben.

---

- Det kan være nødvendigt at oplade batteriet før brug. Der henvises til Biim-brugervejledning for yderligere oplysninger. Indsæt batteriet, og skub det op, så det sidder fast.

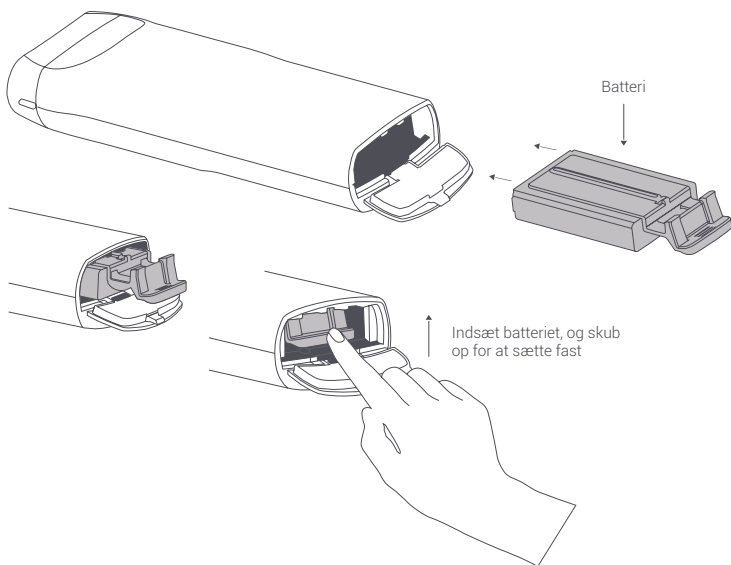

---

Der henvises til Biim-brugervejledningen for at få fuldstændige instruktioner, advarsler og brugsanvisninger til Biim-proben og Biim Ultrasound-appen. Brugere bør læse Biim-brugervejledningen for at få vigtige oplysninger om sikkerhed og garanti. Overtrædelse af brugervejledningens instruktioner kan føre til, at garantien bliver ugyldig. Besøg [www.biimultrasound.com](http://www.biimultrasound.com), eller tryk på knappen "Hjælp" i Biim Ultrasound-appen for at få adgang til Biim-brugervejledningen og få flere oplysninger.

## 2. Download Biim Ultrasound-appen fra App Store eller Google Play til din smartenhed.


---

- Biim Ultrasound-appen er forenelig med udvalgte iOS og Android tablet-pc'er og telefoner.
- Se i App Store eller Google Play for instruktioner om, hvordan du downloader en app.

## 3. Tænd for Biim-proben.

---

- Tryk og hold strømknappen inde i to sekunder.

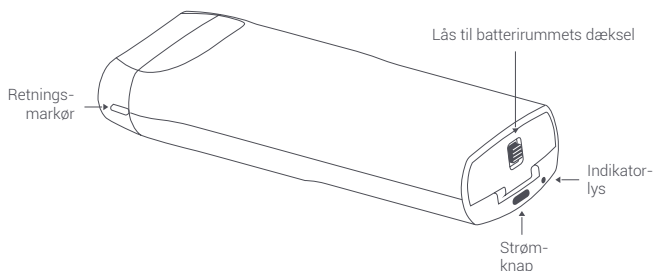

## 4. Forbind Biim-proben med din smartenhed.

---

- a) Åbn visningsenhedens opsætning, og sørg for, at visningsenhedens wi-fi er tændt. Vælg Biim-proben fra wi-fi-indstillinger. Standard adgangskoden er "biimeasy".


Første gang du forbinder enheden, vises Biim-proben som "Biim - probeserienummer". Dit probeserienummer står på Biim-æskan og på indersiden af batteridækslet.

Kig efter symbolet: SN

- b) Gå ud af indstillingerne på din enhed, før du åbner Biim-appen.
- c) Åbn Biim-appen, og følg vejledningen i Biim-startguiden.


## 5. Mød dit nye Biim Ultrasound-system.

Første gang du åbner Biim-appen, vises skærmen Hjem som vist nedenfor.

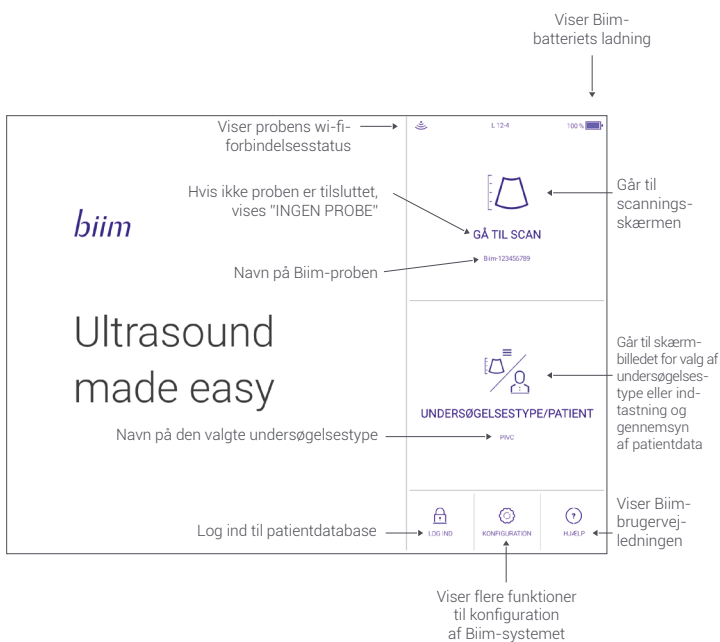


Der henvises til Biim-brugervejledningen for at få fuldstændige instruktioner, advarsler og brugsanvisninger til Biim-proben og Biim Ultrasound-appen. Brugere bør læse Biim-brugervejledningen for at få vigtige oplysninger om sikkerhed og garanti. Overtrædelse af brugervejledningens instruktioner kan føre til, at garantien bliver ugyldig. Besøg [www.biimultrasound.com](http://www.biimultrasound.com), eller tryk på knappen "Hjælp" i Biim Ultrasound-appen for at få adgang til Biim-brugervejledningen og få flere oplysninger.

## 6. Gå på opdagelse på Biim-scanningskærmen.

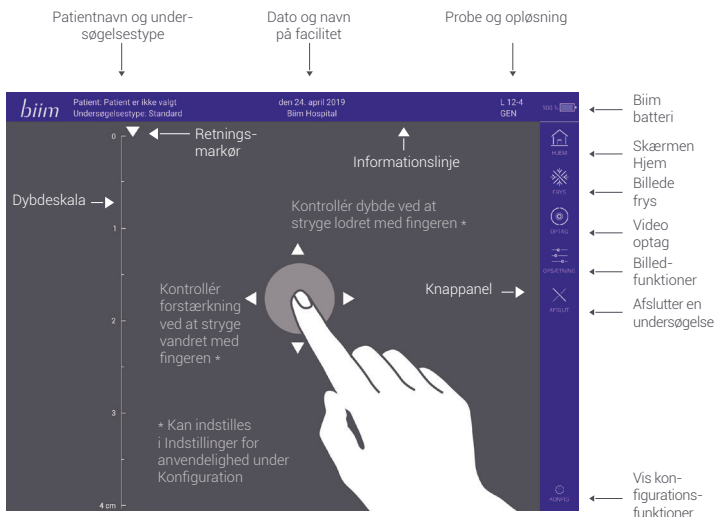

## 7. Lær din Biim-probe at kende.

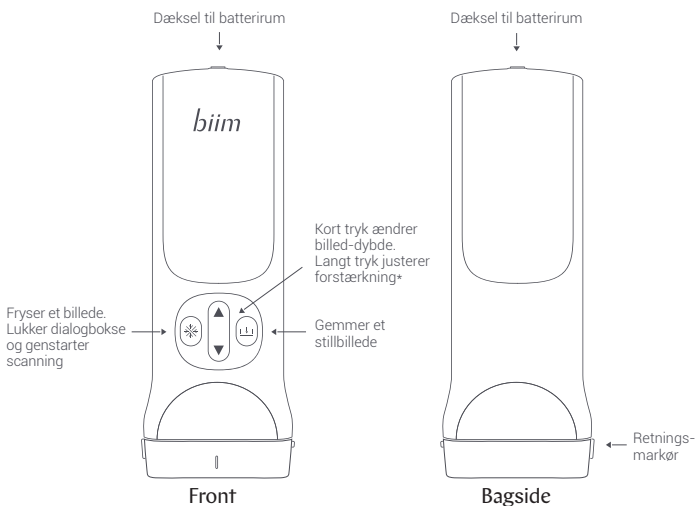

\* Kan ændres i Indstillinger for anvendelighed under Konfiguration

# Ultrasound made easy

[biimultrasound.com](http://biimultrasound.com)

[support@biimultrasound.com](mailto:support@biimultrasound.com)



Biim Ultrasound AS  
Frydenlundsgate 9  
8516 Narvik  
Norge

