

*biim*


Guida  
rapida

Congratulazioni per l'acquisto del sistema Biim Ultrasound. La confezione include la sonda Biim, la batteria Biim e il caricabatteria. La presente Guida rapida aiuta a iniziare l'esperienza Biim. Per istruzioni complete sul sistema Biim Ultrasound, consultare la Guida utente Biim.

## 1. Inserire una batteria Biim carica nella sonda Biim.

---

- Potrebbe essere necessario caricare la batteria prima dell'uso. Per maggiori dettagli, consultare la Guida utente Biim. Inserire la batteria e spingerla in fondo per alloggiarla correttamente nella sede.

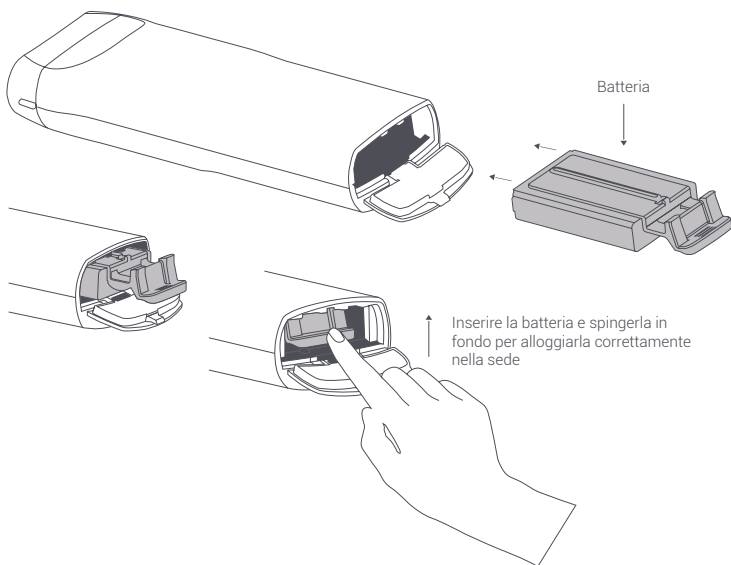

---

Per istruzioni, avvertenze e indicazioni d'uso complete della sonda Biim e dell'app Biim Ultrasound, consultare la Guida utente Biim. Per importanti informazioni sulla sicurezza e la garanzia, gli utilizzatori devono leggere la Guida utente Biim. La mancata osservanza delle istruzioni riportate nella Guida utente può comportare l'annullamento della garanzia. Per maggiori informazioni, visitare [www.biimultrasound.com](http://www.biimultrasound.com), o premere il pulsante "Guida" nell'app Biim Ultrasound per accedere alla Guida utente Biim.

## 2. Scaricare l'app Biim Ultrasound dall'App Store o da Google Play nel dispositivo smart.


---

- L'app Biim Ultrasound è compatibile con determinati tablet e smart-phone iOS e Android.
- Per capire come scaricare un'app, cercare le istruzioni sui siti App Store o Google Play.

## 3. Accendere la sonda Biim.

---

- Premere senza rilasciare il pulsante di accensione per due secondi.

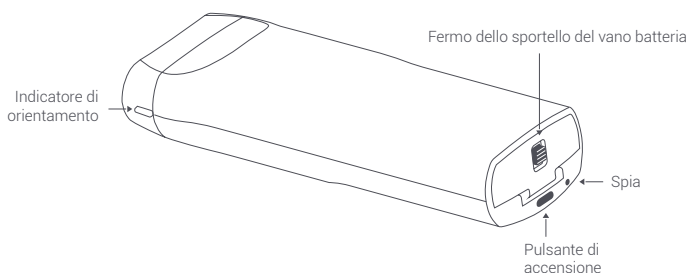

## 4. Collegare la sonda Biim allo smart device.

---

- a) Aprire le impostazioni del dispositivo, assicurarsi che la funzione Wi-Fi sia attivata e selezionare Sonda Biim dalle opzioni Wi-Fi. La password predefinita è "biimeasy".


Alla prima connessione con il dispositivo smart, la sonda Biim apparirà come "Biim - numero di serie della sonda". Il numero di serie della sonda è indicato sulla confezione Biim e all'interno dello sportello del vano batteria.

Cercare il simbolo: **SN**

- b) Uscire dalla schermata delle impostazioni del dispositivo smart prima di aprire l'app Biim.
- c) Aprire l'app Biim e seguire le istruzioni dell'Avvio guidato di Biim.


## 5. Primo accesso al nuovo sistema Biim Ultrasound.

Quando si apre per la prima volta l'app Biim, la schermata Home apparirà come mostrato di seguito.

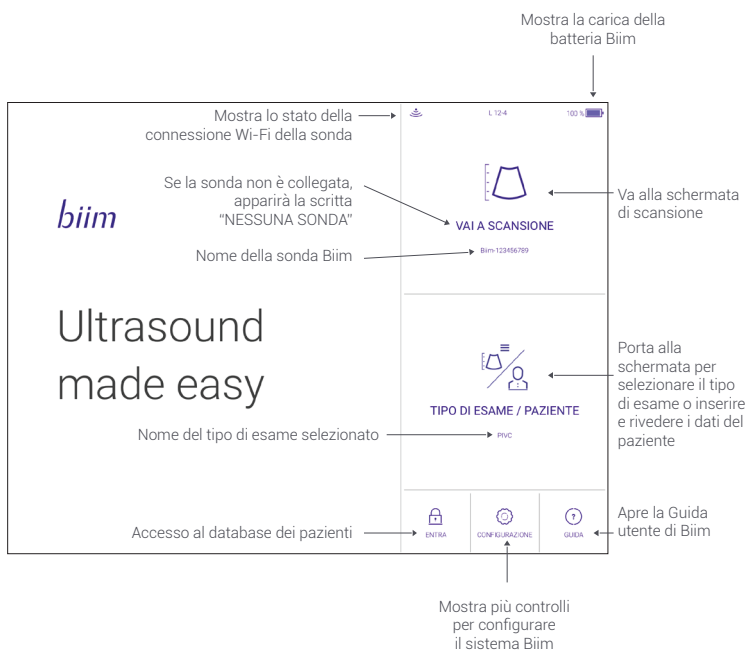


Per istruzioni, avvertenze e indicazioni d'uso complete della sonda Biim e dell'app Biim Ultrasound, consultare la Guida utente Biim. Per importanti informazioni sulla sicurezza e la garanzia, gli utilizzatori devono leggere la Guida utente Biim. La mancata osservanza delle istruzioni riportate nella Guida utente può comportare l'annullamento della garanzia. Per maggiori informazioni, visitare [www.biimultrasound.com](http://www.biimultrasound.com), o premere il pulsante "Guida" nell'app Biim Ultrasound per accedere alla Guida utente Biim.

## 6. Funzioni della schermata Scansione di Biim.

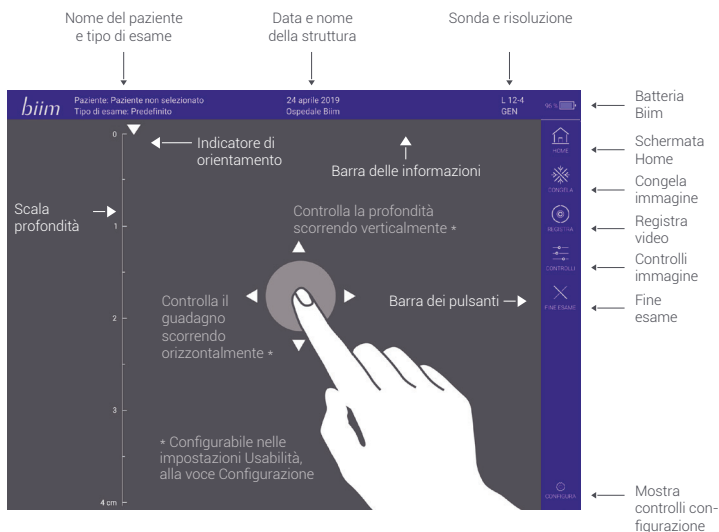

## 7. Conosci la tua sonda Biim.

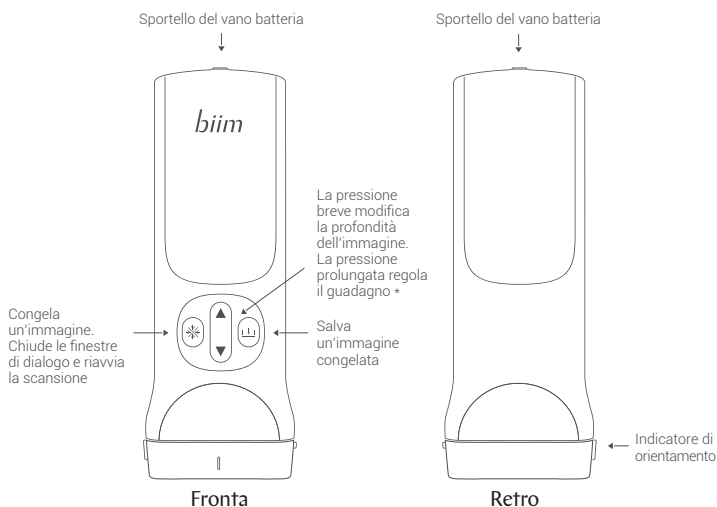

\* Configurabile nelle impostazioni Usabilità, alla voce Configurazione

# Ultrasound made easy

[biimultrasound.com](http://biimultrasound.com)

[support@biimultrasound.com](mailto:support@biimultrasound.com)



Biim Ultrasound AS  
Frydenlundsgate 9  
8516 Narvik  
Norvegia



2797